

Manual do Usuário

Ventilador/Ressuscitador infantil “BabyPAC”

I- Apresentação:

Procedência:

Smiths Medical International Ltd (PneuPAC).
Smithfield House
Crescent Road
Luton, Beds, LU2 OAH
Inglaterra, Reino Unido

Importado com exclusividade por:

MEDTECH - Tecnologia Médica
Av. Senador Pinheiro Machado, 24 cj-11 - 11075-000 - Santos - SP
CGC (MF): 72.905.839/0001-80 IE: 633.327.412.111
Tel. (013) 3234-1130 (Sts) - - Fax (013) 3223-5436
E-mail: medtech@medtech.com.br



a) Cuidados:

O ventilador **babyPAC** foi desenvolvido para operar nas condições mais adversas, no entanto, para prolongar sua vida operacional e manter sua aparência original, cuidados básicos de limpeza e armazenamento deverão ser observados.

- 1) Após cada uso, o aparelho deverá ser inspecionado com atenção a qualquer eventual dano ao circuito do paciente, evidências de uso de excesso de força nos botões, contaminação, falta de alguma parte do ventilador e conteúdo do cilindro de oxigênio;
- 2) Limpeza e esterilização dos componentes de seu circuito;
- 3) Remontagem do sistema e teste operacional;
- 4) Armazenamento em uma área limpa ou em sua maleta de transporte, protegido do calor e luz intensa;

b) Limpeza:

- 1) **Módulo de Controle:** Este poderá ser somente limpo por meio de um pano úmido. Se necessário, um detergente brando ou um agente de limpeza não abrasivo pode ser empregado, desde que posteriormente seja imediatamente seco com um pano macio. O módulo nunca deverá ser imerso em qualquer agente de limpeza ou esterilização. Não deve ser permitido contato com óleo ou graxa, em particular nos conectores de entrada de gases, devido ao risco potencial de incêndio com o uso de oxigênio.

2) **Válvula Expiratória:** A válvula expiratória metálica, localizada na lateral do babyPAC, pode ser desmontada para limpeza se desatarraxando a base da peça onde se encontra o conector de 22mm.

Uma vez aberta, pode-se remover o diafragma de material elastomérico (silicone) para limpeza e esterilização. O conector, assim como os elementos da válvula expiratória, deverão ser inicialmente limpos com água quente corrente ou em uma solução branda de detergente e posteriormente enxaguados e secos. Antes de novamente montada, a integridade do conjunto deve ser verificada.

Atenção:

É fundamental que o **diafragma de silicone** esteja corretamente assentado sobre a parte fixa da válvula expiratória (*ver figura abaixo*), antes que sua tampa seja rosqueada.

Qualquer falha no correto posicionamento deste diafragma de silicone durante a montagem da válvula expiratória irá acarretar em funcionamento inadequado do aparelho !!!!



3) A parte fixa (que fica no corpo do módulo) como não entra em contato com os gases expirados pelo paciente, normalmente não necessita ser limpa. Mas caso isto seja necessário, sua limpeza poderá ser realizada apenas com um pano umedecido.



- 4) **Circuito do Paciente:** O circuito respiratório do paciente pode ser removido e limpo da mesma forma que a válvula expiratória.
- 5) **Conectores de alimentação:** Estes conectores, assim como as mangueiras de nylon trançado utilizadas para conectar o módulo às fontes de gases devem ser limpos da mesma forma que o módulo, com cuidado para não haver contato com óleo ou graxa.


c) Desinfecção:

Após limpeza, os componentes da válvula expiratória e o circuito do paciente devem ser desinfetados por imersão em uma solução germicida, seguindo sempre as orientações do fabricante. Todos os componentes deverão ser enxaguados e secos antes de serem remontados. O módulo de controle pode ser limpo com desinfetante, mas nunca imerso em solução.

d) Esterilização:

Todos os componentes da válvula expiratória e do circuito do paciente, podem ser esterilizados por autoclave a 136 graus ou por gás, seguindo a recomendação do fabricante.

O módulo de controle do **BabyPAC** não pode ser esterilizado.

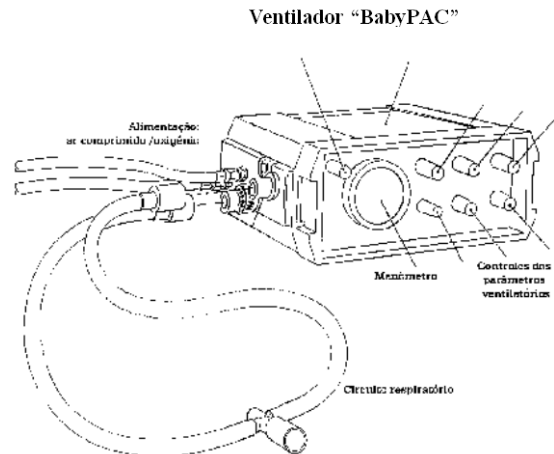

Este equipamento apresenta suporte técnico e garantia de 6 meses contra eventuais defeitos de fabricação, devendo o usuário entrar em contato com:

No Brasil:

MEDTECH - Tecnologia Médica
Av. Senador Pinheiro Machado, 24 cj-11 - 11075-000 - Santos - SP
Tel. (013) 3234-1130 (Sts) - - Fax (013) 3223-5436
E-mail medtech@medtech.com.br

