

INSTRUÇÕES DE USO: # **SONDA LARÍNGEA TIPO MÁSCARA NOVAMASC DESCARTÁVEL em PVC**

Registro MS ANVISA: 10299949006

Modelo

Sonda Laríngea tipo Máscara (Máscara Laríngea) Novamasc-Duo Descartável/Estéril de Duplo-Lúmen em PVC

**** Este produto deve ser utilizado unicamente por profissionais devidamente treinados e familiarizados com suas restrições e cuidados ****

NovaMASC-DUO

Máscara Laríngea NovaMASC-DUO DESCARTÁVEL de SEGUNDA GERAÇÃO de DUPLO-LÚMEN com tubo exclusivo para acesso e drenagem gástrica e outro, somente para ventilação; inteiramente em **PVC** de alta qualidade, macio, conformável e de grau médico, com protetor **ANTI-MORDEDURA** integrado e **estrutura reforçada**.

A **Máscara Laríngea NovaMASC-DUO Descartável /Estéril em PVC** é um dispositivo de alta qualidade, feito em PVC e especialmente desenvolvido para o manuseio das vias aéreas em situações de rotina e em emergências.



A Máscara Laríngea NovaMASC Descartável em PVC se apresenta embalada na forma estéril.

Máscaras laríngeas *não previnem regurgitação ou aspiração*, portanto seu uso em pacientes anestesiados deve ser restrito àqueles em jejum. Várias condições clínico-cirúrgicas podem predispor à regurgitação sob anestesia. Não use a **ML** em caso de dúvida sobre esta possibilidade, ou sem que as devidas precauções para assegurar que o estômago esteja vazio, tenham sido previamente tomadas (veja publicações especializadas)

MÁSCARA LARÍNGEA c/ ACESSO GÁSTRICO NovaMASC-Duo DESCARTÁVEL em PVC

Máscara Laríngea de SEGUNDA GERAÇÃO Tamanhos: nº 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 com DUPLO-LÚMEN e ACESSO GÁSTRICO

Esterilizada em embalagens individuais

Prontas para uso imediato

Conduto com amplo diâmetro

Abas (aletas) proximais que facilitam a fixação
e o correto posicionamento da **NovaMASC-DUO**

Protetor ANTI-MORDEDURA integrado

Conector padrão 15mm ISO

Inteiramente feita em PVC de alta qualidade
macio, conformável e de grau médico

Formato anatômico em "L" curvo

adequado à rápida inserção

Exclusivo "**Berço Protetor**" para o manguito



Exclusivo berço protetor do manguito: ML tamanhos 2,5 a 5,0



DUPLA VIA com lúmen exclusivo para acesso e **drenagem gástrica** e outro somente para ventilação; Acesso independente para sondagem gástrica, permitindo descompressão passiva e ativa do conteúdo gástrico; Manguito (cuff) macio e conformável:

possibilita selamento proximal primário das vias aéreas

e selamento distal secundário para o acesso esofágico-gástrico;

Conformação anatômica interna do coxim, que previne obstrução acidental do conduto ventilatório

Marca linear para referência de posição ao longo do tubo; Código de barras padronizado (EAN);


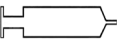
Informações claras sobre volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente;

Balão piloto de paredes finas: maior sensibilidade e precisão quanto à pressão de enchimento do **cuff**

Isenta de látex;

Preparo antes do uso:

Escolha o **tamanho apropriado da Máscara Laríngea NovaMASC-DUO (ML-DUO)** de acordo com a tabela:

Tamanho (nº)	 Peso do paciente	Volume máx. cuff 
1	RN a lactentes até 5kg	até 4 ml
1,5	lactentes de 5 a 10 kg	até 7 ml
2	lactentes de 10kg a 20kg	até 10 ml
2,5	crianças de 20 a 30kg	até 14 ml
3	crianças / adolescentes de 30 a 50 Kg	até 20 ml
4	adultos de 50 a 70 Kg	até 30 ml
5	adultos de 70 a 100 Kg	até 40 ml
6	adultos acima de 100 kg	até 50 ml



Nunca tente utilizar uma ML-DUO cujo tamanho não seja aquele apropriado para o paciente.

Tentativas compensatórias com hiperinsuflação do manguito, podem levar à ventilação inadequada e a um risco maior de complicações.


Técnica sugerida: Recomenda-se uso de luvas no preparo inicial da ML-DUO e durante sua inserção;




O manguito da Máscara Laríngea NovaMASC-DUO deve ser **TOTALMENTE DESINSUFLADO**, previamente ao início da inserção. Lubrifique a face posterior da ML, com geléia neutra hidrossolúvel.

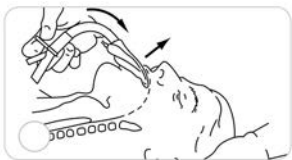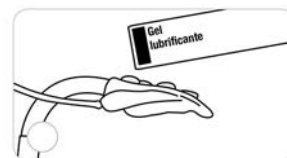

Paciente em posição neutra ou levemente olfativa. Segurar a NovaMASC-DUO na extremidade proximal com o conector apontando para baixo, em direção ao tórax, e a ponta da extremidade distal apontando para o palato.

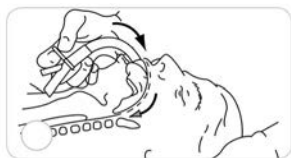

Pressione a ponta da máscara contra o palato duro. Mantendo a pressão contra o palato, continue a girar a máscara para dentro, em um movimento circular, seguindo a curvatura dos palatos duro e mole.

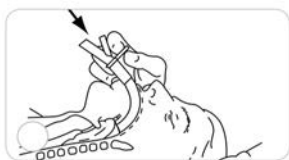

Continue até sentir uma resistência. A extremidade distal da máscara agora deve estar totalmente em contato com o esfíncter esofágico superior. Nesse momento, o dispositivo está totalmente inserido.



Mantendo ainda a pressão para a inserção da NovaMASC-DUO, fixar com fita adesiva passando por cima da aba de fixação. A fixação deve ser realizada antes da insuflação do manguito e com a menor quantidade de ar necessária para se obter uma vedação eficaz (veja tabela acima).

A pressão intramanguito recomendada não deve exceder 60 cm H₂O!

Se para evitar vazamento ou obter uma adequada ventilação pulmonar, for necessário utilizar um volume maior no manguito do que aquele recomendado na tabela, a Máscara Laríngea **NovaMASC-DUO** está mal posicionada ou é pequena para este paciente.

Tabela NovaMASC-DUO X SONDAS GÁSTRICAS

Tamanho (nº)	Peso do paciente	Diâmetro máx. sonda gástrica
1	RN a lactentes até 5 kg	6 Fr / 2.0mm
1,5	lactentes de 5 a 10 kg	8 Fr / 2.7mm
2	lactentes de 10kg a 20 kg	10 Fr / 3.3mm
2,5	crianças de 20 a 30 kg	12 Fr / 4.0mm
3	crianças / jovens 30 a 50kg	14 Fr / 4.7mm
4	adultos de 50 a 70 kg	14 Fr / 4.7mm
5	adultos de 70 a 100 kg	14 Fr / 4.7mm
6	adultos acima de 100 kg	14 Fr / 4.7mm

Se houver resistência à introdução da sonda oro-gástrica, a Máscara Laríngea **NovaMASC-DUO** pode estar dobrada ou mal posicionada. Nesses casos, a máscara deve ser removida e reinserida. **Nunca use força!**




Máscara Laríngea NovaMASC-DUO **DESCARTÁVEL DUPLO-LÚMEN** com tubo exclusivo para acesso e drenagem gástrica e outro, somente para ventilação; inteiramente em **PVC** de alta qualidade, com protetor **ANTI-MORDEDURA** integrado e **estrutura reforçada**; com berço protetor



Esterilizada em embalagens individuais e prontas para uso imediato.
Abas (aletas) proximais que facilitam a fixação e o correto posicionamento da NovaMASC-DUO.
Protetor anti-mordedura proximal integrado.
Conector padrão 15mm ISSO.
Formato anatômico curvo adequado à rápida inserção.

MEDTECH® Tecnologia Médica

Av. Senador Pinheiro Machado, 24 cj-11

11075-000 Santos, SP Tel.: (13) 3234-1130  (13) 99713-4814

Internet: www.medtech.com.br e-mail: medtech@medtech.com.br